



●簡易落下式鼻洗セット

- ・天井から吊るす等して洗浄液を落下させる方式です。
- ・吊るす高さによって水勢が変わりますので、お好みに合わせて設置してください。
- ・洗浄液は塩分濃度1%弱の水溶液（体温程度にして）を作ってお使いください。
- ・水を入れて吊り下げの時や、水の噴出を途中で止めたいときは、チューブのオリーブ近くを折り曲げて止めてください。止め続けたい時はその部分を輪ゴムなどで固定してください。

<つなげ方>

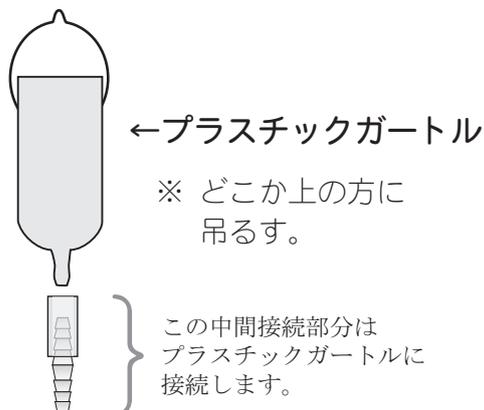

- 使用する食塩水濃度（1%弱）について
 水 500cc+塩 5グラム弱
 水1000cc+塩10グラム弱
 水2000cc+塩20グラム弱
 ※清潔な水と食塩でお作り下さい。

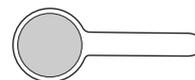


付属の食塩計量スプーン
 擦切り1匙約5g

・プラスチックガートルの種類



2000cc 1000cc 500cc

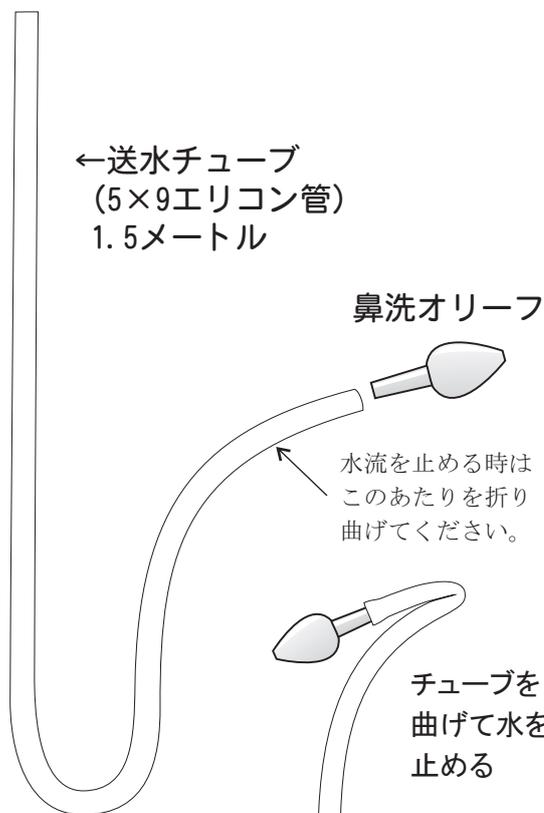

長時間折曲げ状態を続けると癖がつきます。ご注意ください。止め続けたいときは輪ゴム等でこの状態を維持して下さい。

【標準小売価格】

GM141a	500ccセット	： ¥2,980円(税込み)
GM141b	1,000ccセット	： ¥3,300円(税込み)
GM141c	2,000ccセット	： ¥4,400円(税込み)

※ 表示価格は2022年8月現在
 ※ 送料等は含まれません

※ガートルの容量によって3種類あります。