

吸引 汎 ユニット用ディスポ式吸引バッグ

耳鼻咽喉科診療用ユニットの吸引処置に於いて、吸引排気の中に有害エアロゾルが含まれる可能性があります。吸引処置時は十分な換気環境の上、行って下さい。また対ウィルス空気清浄機等の設置もご検討下さい。



モーター
側に接続
吸引物
吸込み口

- 今お使いのユニットの吸引瓶の代わりに使う事が出来ます。（ユニットの吸引瓶収納スペースが狭い場合は収納出来ない場合もございます）
- キャニスター（外側のプラスチック容器）は何度も使いまわし出来ます。
- 吸引瓶からの排気も吸引バッグ内蔵の排気フィルターによりきれいになりますので、従来よりも清潔な診療空間を実現できます。（ただし、フィルターにより吸引力＝排気量が若干低下します）

●ディスポ吸引バッグ（排気フィルター内蔵）



バッグ裏面のフィルター

- ディスポの使い捨てバッグ部分（24枚セットです）。このバッグだけが使い捨て消耗品となります。
- 排気はフィルター（0.3ミクロン、バクテリア除去率99.99%以上）を通過しますので非常にクリーンな排気です。エアロゾルの排出を抑えます。
- 吸引物の気化と泡立ちを押さえる流量レギュレーター付きです。
- 万が一、満タンになってしまっても、吸引が自動的に遮断される吸い込み防止機能が付いてますので、吸引モーターも安全です。
- 廃棄時は別売の専用凝固剤で吸引物を固めることも出来ます。
- 焼却しても有害ガスを発生しません。
- 廃棄方法は、吸引した内容物に応じた処理をしてください。詳しくは管轄の保健所等にお問い合わせ下さい。
（医療廃棄物となるか、吸引物に消毒液を混入して無害化し凝固剤で固めた場合は可燃ゴミとして扱えるのか否か等）

【価格】 ※2020年3月現在（※各税別）

- ◆外側プラスチック容器（2リットルキャニスター）：¥4,000円
- ◆2リットル用ディスポ吸引バッグ（24枚入）：¥13,200円
- ◆凝固剤（24個入）※使用目安 1リットルあたり1個：¥4,320円

★評価用お試しセットもご用意しております：¥8,000円
（内容 キャニスター×1、バッグ×5、凝固剤×5）


※本採用となりましたら吸引バッグと凝固剤を追加でお買い求め下さい。

※この商品は吸引排気中のエアロゾルや単体ウィルス等の完全な除去(100%除去)を保証するものではありません。




- 吸引バッグの吸込み口はやや太いので、ユニット内部の吸引チューブが細い場合は、キャニスターに付属するこのアダプターを接続してお使いください。

(テーエム松井の独自のサービス付属品です)

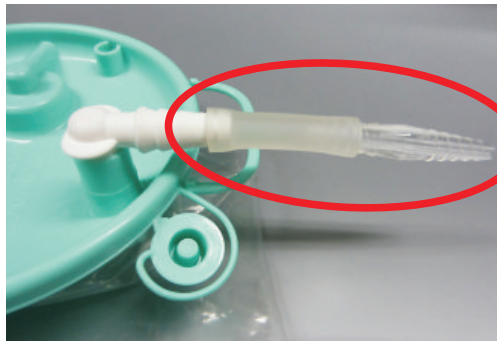


←エリコンチューブ+ネラトンつなぎ

(吸引ルート概略図)

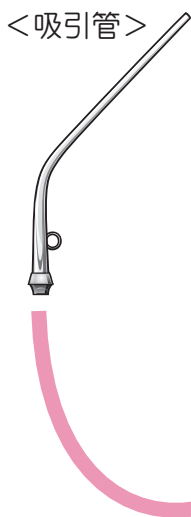

ユニット既存の吸引瓶に繋がっている2本のチューブを付け替えます。
間違えないようにして下さい。




吸気口 排気口

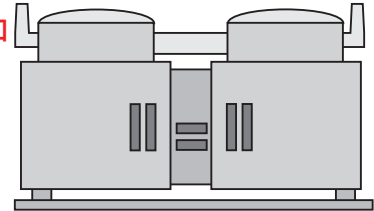


<ユニット内吸引モーター>

吸引 汎 ディスポ式吸引バッグ オプション品


【 ユニット内への設置 】 ※現在お使い中の吸引瓶の設置場所に無理なく安定状態で収まればこの専用設置台は不要です。

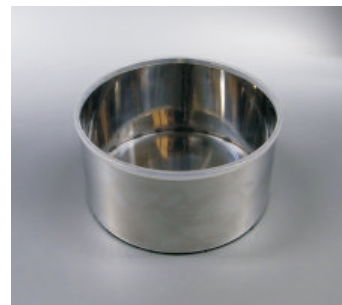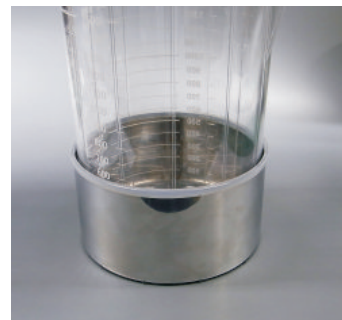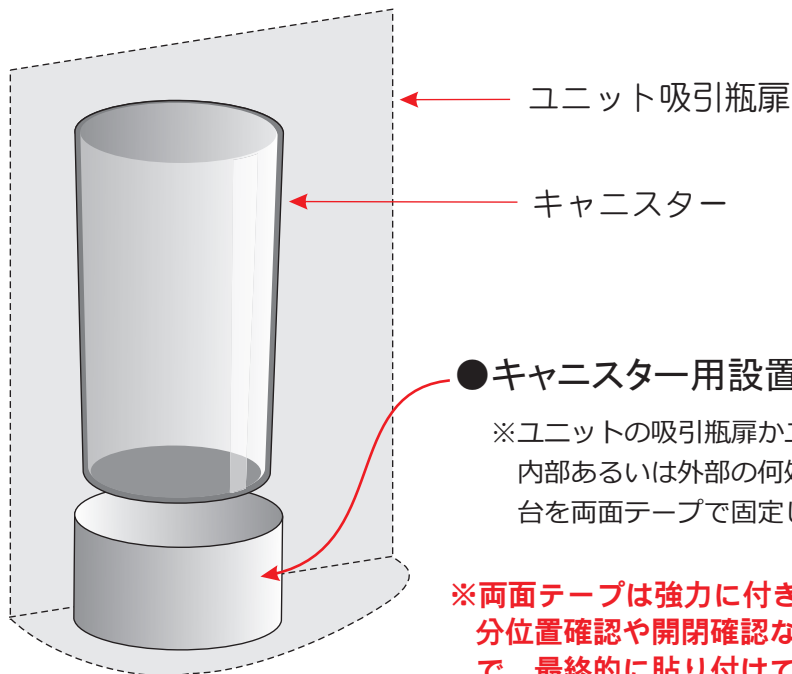

【 壁面への取付け設置の場合 】

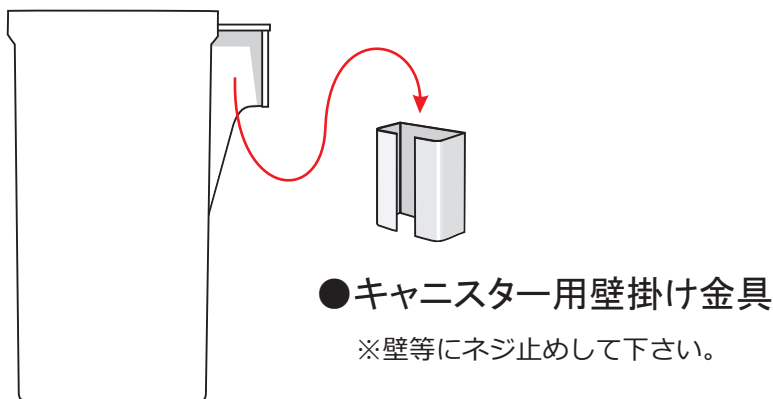

【キャニスター概寸】

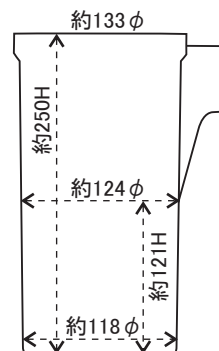

ディスポバッグを付けると、高さ約30cmの收容スペースが必要となります。

【オプション品価格】 ※2020年3月現在 (※ 各税別)

◆キャニスター用設置台： ¥18,000円

◆キャニスター用壁掛け金具： ¥3,900円