

●側頭骨固定器

EQ891



- 金属の三角台の下にタオルなどを敷きますと安定性が増します。

【滅菌消毒方法】

- ◆ 通常は、洗剤を使った水洗浄の後よく乾燥して、消毒用アルコール綿で拭き消毒してください。ネジの回転箇所や金属ドームのネジの通っている穴の部分などには錆付き防止の為、防錆潤滑剤を少量噴射しておくとい良いでしょう。
- ◆ 金属部分はオートクレーブ可能ですが、ゴム部分は不可です。従いまして、もしオートクレーブにかける場合は台の部分は分解する必要があります。お椀状の台ゴムとエッジモールを取り外してください。これらのゴム部分は薬液消毒にしてください。消毒後、ゴム部分を取り付ける際には金属の部分でケガをしないように十分お気をつけ下さい。

- ドーム部分：内径約10cm 深さ約5cm