


外来

● 医研式散粉器 KF121

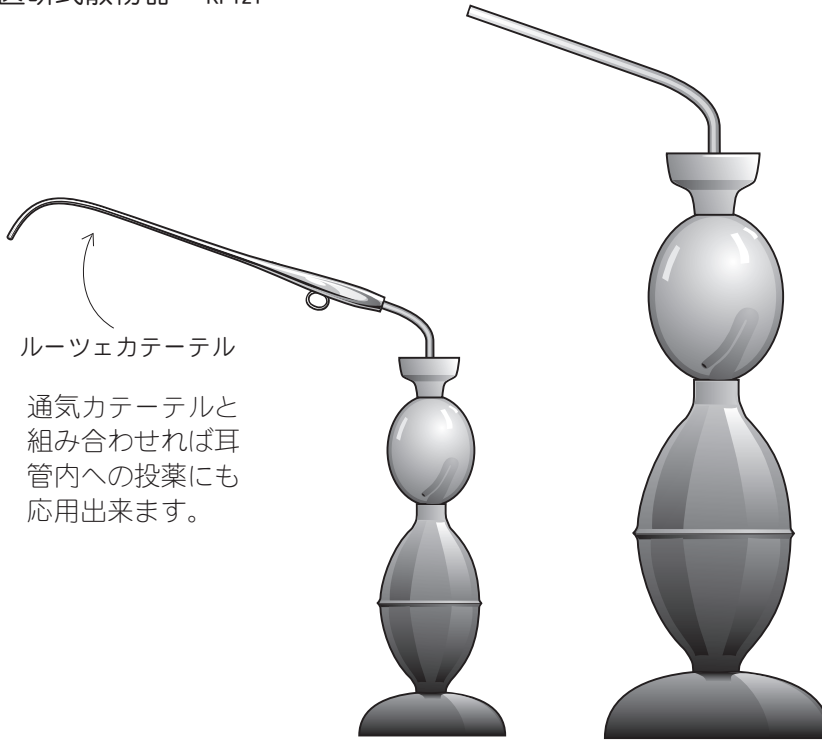


ルーツェカテーテル

通気カテーテルと
組み合わせれば耳
管内への投薬にも
応用出来ます。


※ 医研式散粉器は
龍角散のような
細かい粒子の粉
薬に使用します。

【注意】
粉が固まってしまうので
水洗いはしないで下さい。
滅菌が必要な場合はガス
滅菌をしてください。

● ルーツェ散粉器 KF111

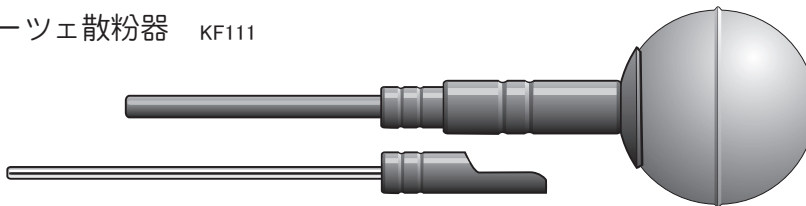

※ ルーツェ散粉器は
微量 (定量的) な
粉薬や食塩的な比
較的粒子が粗い粉
薬も吹けます。

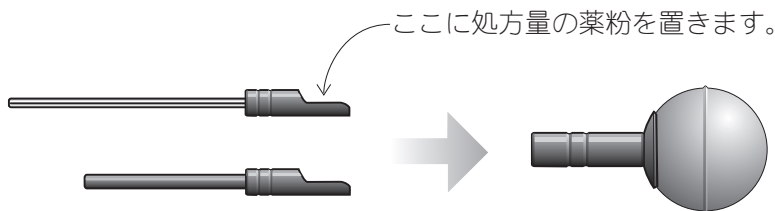

どちらか必要に応じて付替えて使います。