


●ヤンカーサクシオン  
 (接続アダプター付属)  
 QN821

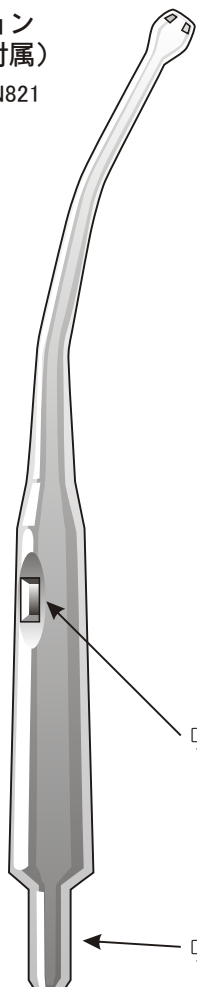

■家庭用吸引器等に接続して、介護等での口腔内吸引などに用います。

■当社で販売しているヤンカーサクシオンは主として、入院患者、在宅介護などで患者個人様がその方の自分専用として、洗浄と消毒をしながら、繰り返し使用する用途を想定しております。また未滅菌製品ですので急を要する環境での使用にはあまり向いておりません。


■病院の外来や救急救命等で使用する場合は、滅菌済みのディスポ製品を推奨いたします（当社では販売しておりません）。

吸引力調節口

指先でふさぎながら吸引力を調整します。  
 (不要の場合はテープ等で塞いでください)

吸引ホースにつなぐ

**【細い吸引ホースにつなぐ場合】** (付属の接続アダプター使用法)

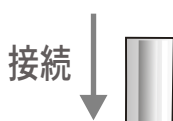

【付属品】  
 6 \* 10 エリコン管  
 (ヤンカーサクシオンに付属)

エクセロン管等のチューブ類はヤンカーサクシオンにつなぎっぱなしにしないでください。接触部分が軟質化して(ヤンカーサクシオンが軟化します)使えなくなってしまう。



【付属品】  
 ネラトンつなぎ  
 (通常、吸引器に付属)

ネラトンつなぎは吸引器のホースと各種吸引嘴管先を繋ぐために使います。



吸引ホース  
 (吸引器の吸引瓶に繋がるホース。通常、吸引器に付属。)