


手術

外来

先端管の部分はシリコン製で適度な弾力を持ちながら軟らかく曲がります。
乳幼児・幼児の鼻腔や口腔の吸引に最適です。また一般介護等においても使えます。

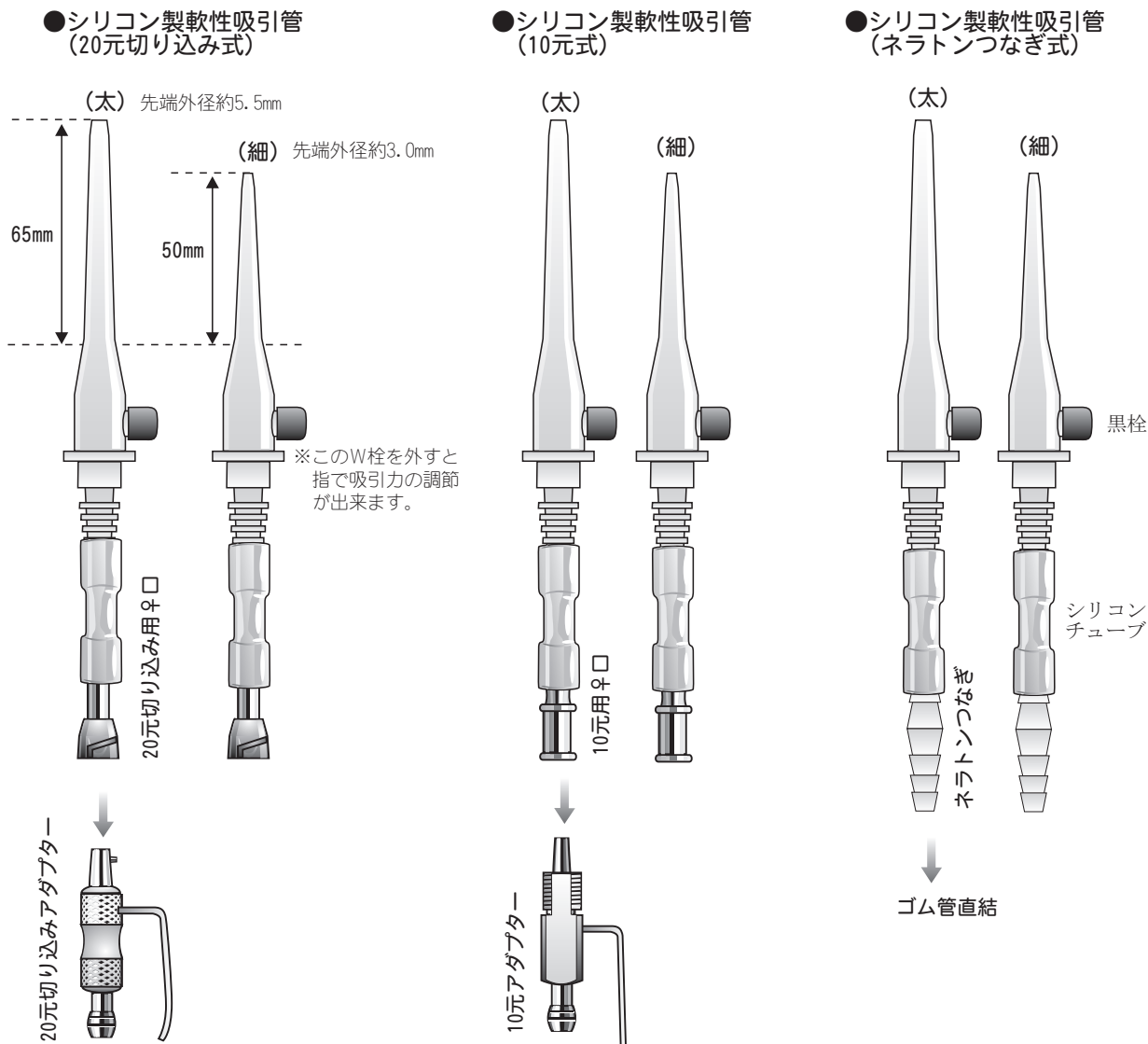

- この商品は未滅菌です、使用前に滅菌か消毒を行って下さい。また別途吸引器が必要です。
- 基本的に Disposable 商品となっておりますが、使いまわす場合には除菌洗剤による水洗浄の後、良くすすぎシリコンに対応している滅菌消毒液で滅菌消毒してください。金属の♀アダプターを付けた状態で浸漬する時は金属にも対応する消毒液を選択してください。消毒液浸漬が推奨方法です。
- オートクレーブ滅菌する場合はシリコンチューブと黒栓部分を外して、上に物を載せない状態にして約120度位で行って下さい。そうしないとシリコン部分が温度と圧力で変形します。

