


外来

●プラスチック製水銃（洗浄針1本付）

TU631

- ・アダプタを付けない状態で洗浄水（ぬるま湯）を吸い上げます。
- ・シリンジの噴水口に5元アダプタをつなげます。
洗浄針を使用すると細い水流が出ます。
- ・外耳道内に向けて噴水します。
- ・排水は耳洗受水器等で受止めてください。
- ・シリンジ容量120cc。

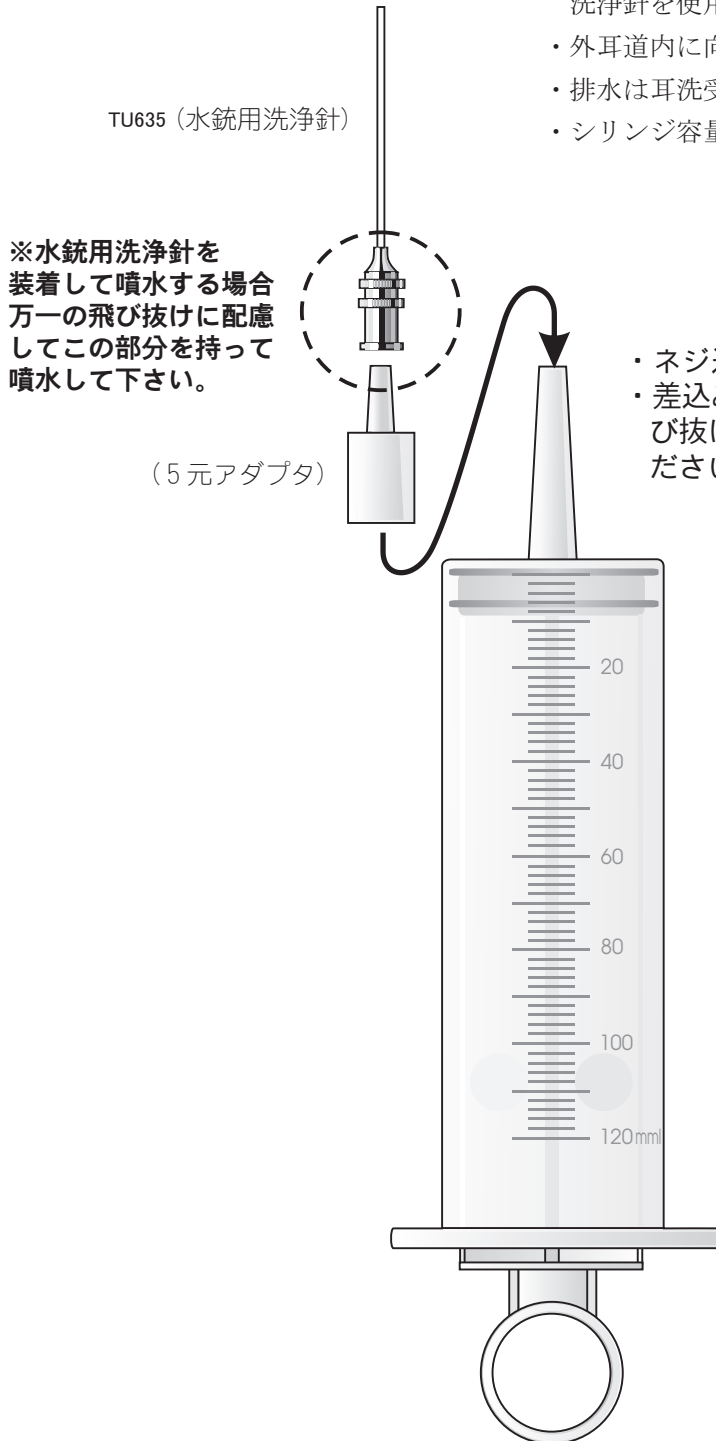

- ・ネジ込む様に接続します。
- ・差込みが甘いと噴水中に飛び抜けますので注意してください。

●耳洗受水器（別売品）RK556



※ 耳洗をする際に耳の下にあてがい水を受け止めます。

W 16cm
D 8cm
H 12cm