

類別：(38749000) 器32 医療用吸引器 一般の名称：再使用可能な汎用吸引チップ 【クラス I 一般医療機器】

## 販売名：TM吸引管A (プレツァーオリーフ 小児用吸引管)

※ 個別の詳細製品名は納品書等でご確認下さい

### 【警告】

この製品は対人処置手術用医療機器です。使用する人は十分注意を払い、正しい使用目的においてのみお使い下さい。使用方法を誤りますと人体に被害あるいは人命に関わる事があります。鋭利な部分でケガ等をしない様に取扱いや持運びには十分ご注意下さい。

### 【禁忌禁止】

- ・ 強酸性、強アルカリ性、塩素系の各溶液への浸漬。
- ・ 水分を付けた状態での放置（錆の発生）。
- ・ 医療機器修理業者以外による修理。
- ・ 改造。

### 【形状・構造及び原理】

- ・ 形状＝先端部が硝子の中空蕾状であり、金属製等のコネクタやそれらを接続するシリコンチューブを付帯する場合がある。
- ・ 構造原理＝吸引陰圧を伝達する中空状の構造物。
- ・ 原材料＝硝子、真鍮（クロームメッキ）、シリコン。

### 【使用目的、効能又は効果】

- ・ 主として小児の鼻孔に先端部をあてがい、鼻汁等を吸引するために用いる。

### 【操作方法又は使用方法等】

- ・ 手動。チューブを介して吸引装置と接続し、先端を目的個所に近づけるか接触させて鼻汁を吸い取る。

### 【滅菌方法】

- ・ 本製品は未滅菌なので使用前に洗浄、滅菌か消毒すること。滅菌か消毒かの選択は診療環境に応じて判断して下さい。
- ・ 再使用可。
- ・ 初回使用前の洗浄は器械表面に付着している保護用油分や残留粒子等を落とすために中性洗剤とスポンジを用い、入念に洗浄すること。すすぎは十分に行うこと。
- ・ 使用後は除菌洗剤とスポンジやブラシで水洗浄を行い、肉片、血液、粘液をほとんど洗い流す。
- ・ 細かい洗浄ブラシで内部の残留物を押し出し目詰りを予防する。その後、吸引アダプター接続口側から送水する事も管内の洗浄に有効です。
- ・ 超音波洗浄器の使用は、先端硝子部の中空域に水が侵入することが有るので長時間の洗浄は避けること。
- ・ オートクレーブ、EOGガス滅菌が可能。  
オートクレーブは132度、2気圧、10分間程度が目安。脱塩素水の利用および、滅菌バッグを推奨。・プラズマ滅菌はシリコンに対応する装置であれば可。

- ・ 薬液消毒浸漬の場合は、硝子、金属、シリコンに対応する消毒液を選択して、その消毒液の添付文書で指定している時間浸け置きすること。
- ・ 強酸性水、強アルカリ性水を使用する洗浄は、金属部分に錆や変色（黒化）、色むら、腐食が発生する事がある。作用部位に機能的な障害が出なければそのまま使用可能。外観上嗜好的問題がある場合は使用を中止する。一時的に用いる場合は、そのあとすぐに水で洗い流すこと。
- ・ 次亜塩素酸ナトリウム系（ミルトン、ピューラックス等）の消毒液は、金属の影響で消毒液が黒く変色することがあります。また金属が腐食、変色するので出来るだけ使用を避けてください。一時的に短時間用いる場合は、そのあとすぐに水で良く洗い流すこと。

### 【使用上の注意】

- ・ 本品は未滅菌です。使用前に滅菌・消毒して下さい。
- ・ 使用する際、抗力により製品が破損或いは破壊するほどの入力避けること。同様に人体への創傷に注意すること。
- ・ 吸引処置中は、目詰まりを予防するために吸引処置前に水を少量吸引してから行って下さい。また吸引終了後は十分に水を吸って、管内部に残留物を残さないようにして下さい。使用後は十分に流水で管内部まで洗浄してください。
- ・ 新品時、差込口等に白あるいは青緑色の粉末状の汚れが付いている場合がありますが、これは製造過程で付着したメッキ処理の跡です。洗浄（アルコール拭拭）してこれらを落としてお使い下さい。

### 【貯蔵・保管方法及び使用期間（有効期限）等】

- ・ 滅菌後は速やかに紫外線保管庫などの無菌空間に移しかえ保管すること。
- ・ 滅菌バッグ包装状態であればそのまま、清潔かつ安全な場所に保管すること。
- ・ あまりに長期間の使用は使用中の突然の破損などの不意な事故につながりかねませんので5年間を目処に買い替えをするように心がけてください。

### 【取扱い上の注意（および輸送、受渡時）】

- ・ 直射日光、湿気、埃、物理的衝撃を避けること。積重ねによる変形に注意すること。

### 【保守、点検に係る事項】

- ・ 使用前、洗浄後に劣化部分や破損部分、破損しかけている部分がないかを点検し、もし異常を発見したらその製品は使用を止める。必要に応じて医療機器修理業者に修理を依頼するか廃棄して下さい。
- ・ 使用中違和感を感じたら破損の前兆と捉え使用を中止して下さい。

### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

- 株式会社テーエム松井（発売元および問合せ先）  
〒113-0034 東京都文京区湯島3-4-13 TEL 03-3831-3287

**TM matsui 株式会社テーエム松井**（耳鼻咽喉科医療器械）

添付文書（医薬品医療機器等法第63条2第1項規定）および 医療機器販売業者等における品質確保手順書（QMS省令第72の2条第2項2号）準拠

— この文書内容を無断で転載転用する事を禁止します —